

Guia Técnico

Tubos PRP



Uma nova geração de PRP

Uma solução inteligente, eficiente e custo-efetiva para o preparo de PRP (plasma rico em plaquetas) e L-PRP (plasma rico em plaquetas e em leucócitos), em protocolos de 8 minutos.

Sua eficiência, permite maior viabilidade celular com protocolos simples e seguros, dentro de um sistema fechado, livre de contaminação.

Material extra necessário para preparar o PRP:



- Scalp 21G com sistema à vácuo
- Adaptador de agulha para coleta à vácuo
- Jelco (abocath) 14G
- 2 seringas de 5ml
- 1 seringa de 10ml

	PRP	L-PRP
Força G	830 G	830 G
Tempo	8 min	8 min
Volume	4 ml	4,5 ml

Para elevar a qualidade do produto final, é necessário utilizar uma centrífuga com rotor basculante.

PRP

RICO EM
LEUCÓCITOS
(LR-PRP)

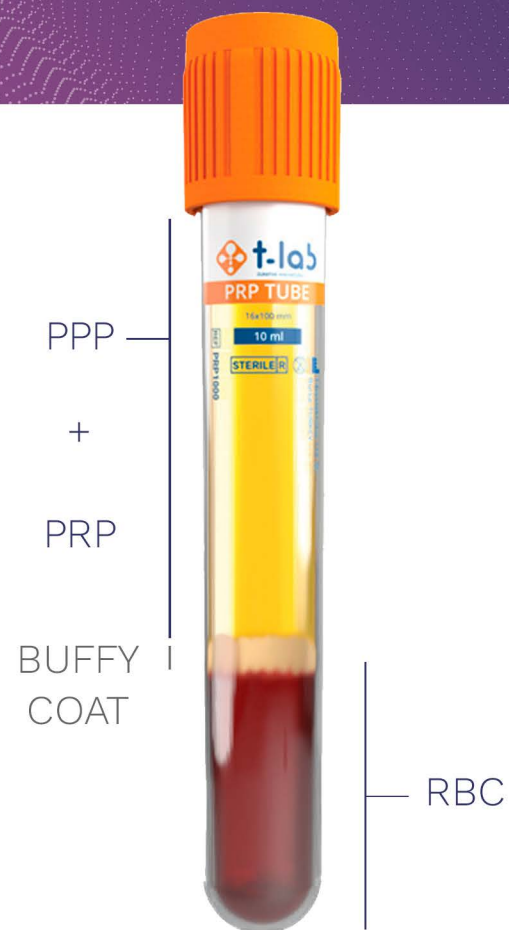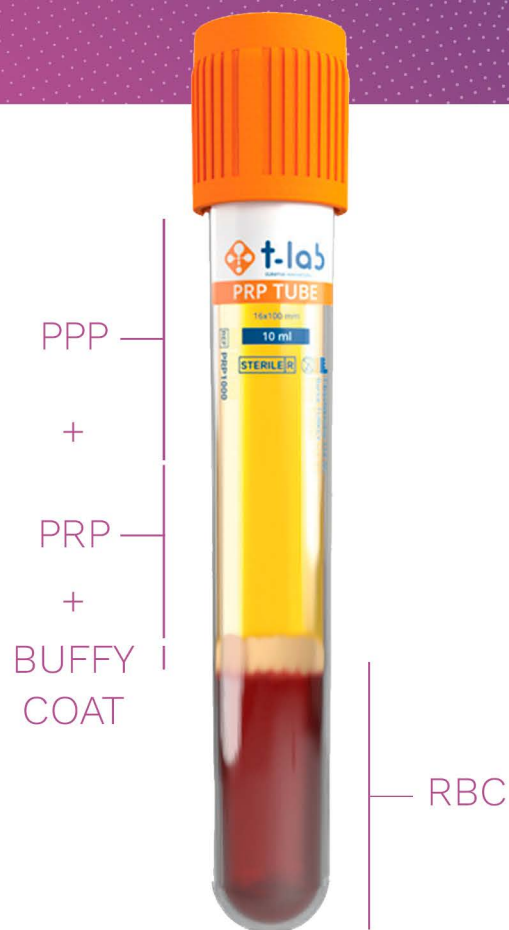

PRP

PURO
(LP-PRP)

Protocolo | PRP




01. COLETE OS 2 TUBOS DE SANGUE DO PACIENTE

- Homogenize os tubos



02. CENTRIFUGUE

- Utilize uma centrífuga de rotor basculante
- Centrifuge a 830G por 8 minutos

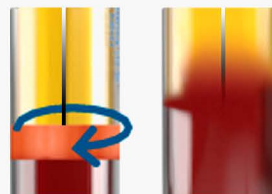

03. COLETE O PRP

- Inclua o BUFFY COAT para o L-PRP
- Colete apenas o PPP+PRP para um PRP puro



04. RESSUSPENDA EM UMA SERINGA O MATERIAL COLETADO

- Transfira o plasma coletado dos dois tubos em uma única seringa de 10 ml e homogenize

Conheça a **Nexgeen Centrifuge.** A primeira centrífuga compacta com rotor basculante do Brasil.



A Nexgeen Centrifuge S-106 foi especialmente projetada para aplicações na medicina regenerativa, tais como PRP, PRF e SVM, com os mais altos níveis de qualidade. Com sua tecnologia de aceleração e desaceleração controlada, proporciona máxima estabilidade para dispositivos de preparo de PRP e PRF que não utilizam gel.

Visite nosso site para saber mais.



ROTOR
POP-UP



MÁXIMA
ESTABILIDADE

RESPONSABILIDADE LEGAL

O conteúdo deste guia destina-se apenas a fins informativos gerais e não constitui aconselhamento relacionado a nossos produtos, saúde ou doenças. As informações aqui apresentadas não têm a intenção de substituir a orientação de um médico, nem servem ao propósito de fornecer diagnóstico ou tratamento médico. Antes de iniciar qualquer tratamento relacionado aos produtos mencionados aqui, é altamente recomendável que você consulte seu médico sobre sua condição de saúde ou doença específica. Produto registrado na ANVISA - 82251719003 | 82251719008

O futuro da medicina, hoje.

The future of medicine, today.



Aponte sua
câmera para o
QR CODE
para saber mais!

Rua Francesco Coppini, 68 - 2º andar
Nova Gerty, São Caetano do Sul - SP | CEP: 09580-000
✉ comercial@nexgeen.com.br ☎ +55 (11) 2668 5368
nexgeen.com.br